	<i>Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</i>		
	<i>Codice:AL.RCRI.039.2012.00</i>	<i>Data emissione:ottobre 2012</i>	<i>Validità dal:ottobre 2012</i>

Allegato 5

**APPARECCHIATURA
LAVAENDOSCOPI SOLUSCOPE 3**

Macchina concepita in perfetta rispondenza alla EN 15883, la durata massima del processo, ciclo completo di lavaggio, sterilizzazione ed asciugatura è di 17 min circa, effettua il controllo assoluto su tutti i canali di qualsiasi marca e modello di strumenti, identifica gli strumenti tramite bar-code al momento dell'inserimento in macchina, tracciabilità assoluta con memoria dati di 10 anni e refertazione ciclo sistema con cedolino in doppia stampa, sistema di filtraggio acqua a filtri 1-0.2 e 0.22 micron, lavora con acqua a temperatura tra i 35 e i 40 gradi C°, utilizza acido per acetico monouso con prelievo automatico e scarico diretto in rete fognaria.

Il lavaggio e la sterilizzazione avviene su tutte le superfici interne ed esterne dello strumento attraverso immersione totale e circolazione interna del detergente e dell'acido per acetico, è corredata di tutti gli accessori per la connessione dei differenti strumenti.

La macchina effettua test di tenuta, detersione, risciacquo, disinfezione, sterilizzazione ed asciugatura diversamente a seconda del ciclo richiesto.

Programmi in uso presso il POLO ENDOSCOPICO AMB CISTOSCOPIA.

CICLO 1 lavaggio semplice


- test di tenuta
- prelavaggio
- lavaggio
- risciacquo
- disinfezione 5 min
- risciacquo
- asciugatura
- durata 20 min

CICLO 2 doppio lavaggio

- test di tenuta
- prelavaggio
- lavaggio
- risciacquo
- lavaggio
- risciacquo

Struttura: Soc Rischio Clinico e Rischio Infettivo
FAX 0142 434614
Tel 0142434695



		<i>Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</i>	
<i>Codice:AL.RCRI.039.2012.00</i>	<i>Data emissione:ottobre 2012</i>	<i>Validità dal:ottobre 2012</i>	<i>Allegato: 5</i>

- disinfezione
- risciacquo
- asciugatura
- durata 22 min

CICLO 4 disinfezione semplice

- test di tenuta
- prelavaggio
- disinfezione
- risciacquo
- asciugatura
- durata 15 min

CICLO 6 autodisinfezione linee

Dopo ogni programma quotidiano e dopo la sostituzione dei filtri dell'acqua e prima di ogni programma se la macchina non è stata utilizzata da piu' di 72 ore.

Si procede al gonfiaggio della guarnizione con F!0 a coperchio aperto e si procede alla decontaminazione della guarnizione e della vasca con un panno a perdere imbevuto di amuchina.

Si sgonfia la guarnizione premendo il tasto blu e si riporta con una lieve pressione la guarnizione sgonfia nel suo alloggiamento. Inserire il connettore del test di tenuta e chiudere il coperchio.

Chiudendo il coperchio e la macchina eseguirà':

- disinfezione della vasca di separazione
- disinfezione dell'unita' di prefiltrazione piu' filtro dell'acqua 0.2 micron

Macchina in stand-by per riutilizzare la macchina premere su F3


- asciugatura dei circuiti interni
- durata ciclo 57 minuti


PER IMPOSTARE QUALSIASI CICLO PREMERE F3 E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI DEL DISPLAY LUMINOSO

DISINFETTANTI IN USO

SOLUZIONE A

Additivo concentrato: composto da agenti stabilizzanti, anticorrosivi ed eccipienti

<i>Struttura: Soc Rischio Clinico e Rischio Infettivo</i> FAX 0142 434614 Tel 0142434695	
--	---

		<i>Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</i>	
<i>Codice:AL.RCRI.039.2012.00</i>	<i>Data emissione:ottobre 2012</i>	<i>Validità dal:ottobre 2012</i>	<i>Allegato: 5</i>

Frasi di rischio

R 10 infiammabile

R 36 irritante per gli occhi

R 67 l'inalazione dei vapori puo' provocare sonnolenza e vertigini

Frasi di prudenza

S 37 usare guanti in nitrile o neoprene nonche' tutti i DPI

SOLUZIONE P

Disinfettante concentrato: composto da perossido di idrogeno, acido acetico e acido peracetico al 5%.

Frasi di rischio

R 7 infiammabile

R 34 provoca ustioni

R 22 nocivo per ingestione

Frasi di prudenza

S 36/37/39 utilizzare tutti i DPI

SOLUZIONE C

Detergente concentrato: composto da ammonio quaternario, acido glicolico, tensioattivi

Frasi di rischio

R 38 irritante per la pelle


R 41 rischio di gravi lesioni oculari

Frasi di prudenza

S 37/39 utilizzare tutti i DPI

Prima di sostituire le taniche aspettare che lo richieda la macchina e seguire le indicazioni del display luminoso.

Le rimanenze delle soluzioni dopo la rimozione delle taniche non devono assolutamente essere versate nella rete fognaria ma devono essere conferite alla Ditta appaltatrice il Servizio di smaltimento rifiuti sanitari.

<i>Struttura: Soc Rischio Clinico e Rischio Infettivo</i> FAX 0142 434614 Tel 0142434695	 <i>una sanità in salute fa bene a tutti</i>
--	--