

SEQUENZA VESTIZIONE DPI CON TUTA IN TYVEK

						
1. Prepara tutti i DPI su un ripiano pulito; ricopri il piano con un telo in TNT	2. Prepara Amukina Spray e gel alcolico	3. Idratati	4. <u>Togli tutti i monili, gioielli, orologi</u>	5. Esegui accurata igiene mani con gel alcolico	6. Indossa cuffia ad elastico per contenere tutti i capelli	7. Indossa i calzari lunghi al ginocchio
						
8. Indossa il I° paio di guanti (guanti monouso in nitrile)	9. Indossa la tuta di tyvek (DPI di classe III)	10. Allaccia la cerniera fino al mento; - copri la cerniera senza applicare l'adesivo - non indossare il cappuccio	11. Indossa il grembiule monouso	12. Fai passare il grembiule sotto il cappuccio della tuta	13. Indossa il facciale filtrante	14. Effettua la prova di tenuta (vedi allegato 3/b)
						
15. Indossa il copricapo a mantellina	16. Indossa lo schermo facciale	17. Ancora la fettuccia del polsino della tuta al pollice	18. Indossa il II° paio di guanti (guanti lunghi tipo ostetrici)	19. Ricopri completamente gli avambracci con i guanti	20. Vestizione completa	